

CL400

Komforttelefon mit Hörverstärkung und Hoch-/ Tieftonregelung



Benutzerhandbuch

Warnung: Dieses Telefon wurde speziell für schwerhörige Personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der Lautstärkereglер des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.

INDEX

-Beschreibung	5
-LCD Anzeige	7
-Bildschirmanzeige	8

AUFBAU

-Anschließen des Telefons	9
-Wandinstallation	11

EINSTELLUNGEN

- Einstellung des Klingeltons	12
- Alarm- und Klingeltoneinstellungen	13
- Einstellen von Puls- oder Tonwahl Anzeige „Neuer Anruf“ & „Nachricht“	13 14
- Auswählen der Datums / Uhrzeit Anzeige	14
Einstellen des Datums und der Uhrzeit	16
Einstellen der Sprache	16
Einstellen des Display-Kontrasts	17
Automatisches Auflegen	18
Automatische Displayanpassung	19
Einstellen der Flashzeit	20

BENUTZUNG DES TELEFONS

- Annahme eingehender Telefonanrufe	21
- Einen Anruf tätigen	22
- Benutzung der Hörerverstärkung	24
- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer	24

INDEX

- Aufruf der 30 zuletzt gewählten Rufnummern	25
- Mikrofonstummschaltung	25
- R-Taste, * und # - Taste	26
- Speichern von Telefonnummern	26
- Wählen gespeicherter Rufnummern	27
- Benutzung des Headsets	28
- Benutzung der Induktionsschleife	29
- Benutzung des Vibrationskissens	30

EINSTELLEN DER SPRACHVERSTÄRKUNG 31

EINSTELLEN DER HÖRERLAUTSTÄRKE SOWIE DER HÖHEN UND TIEFEN 32

TELEFONBUCH

- Einen Eintrag erstellen	34
- Einen Eintrag aus der Liste der entgangenen Anrufe erstellen	36
- Einen Telefonbucheintrag löschen	37
- Ändern eines bestehenden Telefonbucheintrags	37
- Einen Anruf an eine im Telefonbuch stehende Nummer tätigen	38

RUFNUMMERNANZEIGE

- Liste der entgangenen Anrufe	39
--------------------------------	----

INDEX

- Aufruf einer Nummer aus der Liste	41
- Löschen eines Eintrags der Liste	42
- Löschen aller Einträge aus der Liste	43
- Benutzen der Funktionen Anklopfen und Makeln	43
- Anzeige wartende Nachricht	46

GEWÄHRLEISTUNG	47
-----------------------	----



Für Hilfe und Informationen zu unseren Produkten, besuchen Sie unsere Website

www.geemarc.com

Tel : + 33 (0) 3 28 58 75 75

Fax : + 33 (0) 3 28 58 75 76

BESCHREIBUNG

1 BESCHREIBUNG




BESCHREIBUNG



BESCHREIBUNG

2 - LCD BILDSCHIRM

Beispiel des Displays (bei aufgelegtem Hörer)

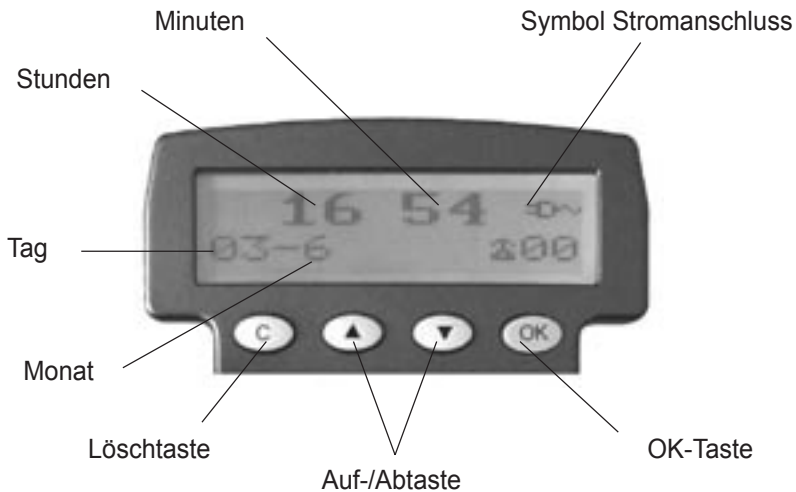

- Die **OK**-Taste wird benutzt um eine Aktion oder Auswahl auf dem Bildschirm zu bestätigen.
- Die **▲ ▼** Tasten werden verwendet um im Menü nach unten oder nach oben zu scrollen.
- Im Allgemeinen wird die **C**-Taste benutzt um eine Aktion/ einen Eintrag abzubrechen, sie kann jedoch auch zur Bestätigung einer Auswahl verwendet werden (z. B. beim Löschen einer gespeicherten Nummer).

BESCHREIBUNG

3 - DISPLAY-SYMBOLLE

Ihr CL 400 hat ein Display das verschiedene Symbole anzeigt, die Ihnen bei der Bedienung des Telefons helfen.



Das Telefon ist batteriebetrieben
+ Batterieanzeige




Das Telefon wird am Stromnetz betrieben



Speichern ist notwendig



Displaykontrast

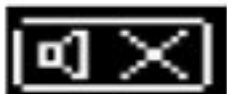

„Stummschaltung“ ist aktiviert



Lautsprecher ist aktiviert



Sie haben verpasste Anrufe



Sie haben neue Nachrichten

INSTALLATION

1 - ANSCHLIESSEN



(*) klassifiziert TNV-3 entsprechend dem EN60950 Standard.

(**) Klassifiziert „Lebensgefährliche Spannung“ entsprechend EN60950 Standard.

Wichtig: Nur das Geemarc Vibrationskissen, die Geemarc Induktionsschleife, das Geemarc Headset und das Geemarc Stromkabel können an die Anschlüsse angeschlossen werden.

- Schließen Sie den Telefonhörer an
- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie die 4 Micro (AAA) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang) richtig herum in das Batteriefach an der Unterseite des Telefons ein.

Anmerkung: Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Bitte Beachten Sie die Bestimmungen entsprechend der Entsorgung von Batterien.

- Schließen Sie das Batteriefach
- Schließen Sie das Telefonkabel an die Anschlussbuchse(*) an und verbinden Sie das Telefon mit der Telefondose.

INSTALLATION

- Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzanschluss auf der Rückseite des Telefons und schließen es dann ans Netz an(**). Bitte wählen Sie eine Steckdose nahe der Telefonanschlußdose, damit sie das Telefon im Falle eines Problems schnell ausstecken können.

Bemerkung: Der Netzstecker muss für den Gebrauch vollständig intakt sein. Batterien sind für den Fall eines Stromausfalles notwendig, um Datenverlust zu vermeiden. Falls der Netzstecker versehentlich gezogen wird (oder im Falle eines Stromausfalles) werden Batterien zur Benutzung des Telefonspeichers benötigt. Im Falle, dass die Batterien leer sind oder nicht richtig platziert sind, ist das Telefon nur beschränkt funktionsfähig (Anrufe tätigen oder Anrufe annehmen).


INSTALLATION

2 - WANDINSTALLATION

Um ihr Telefon an der Wand zu befestigen, ziehen sie den Clip (der in der Basis, direkt unter dem Hörer positioniert ist) heraus, drehen ihn und stellen ihn in die Position zur Wandbefestigung.



Das wird dafür sorgen, dass der Hörer nicht aus der Halterung herausrutscht. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Abstand von 80mm in die Wand (nutzen Sie dazu die Wandinstallations-Schablone) und führen die Dübel und die Befestigungsschrauben ein.

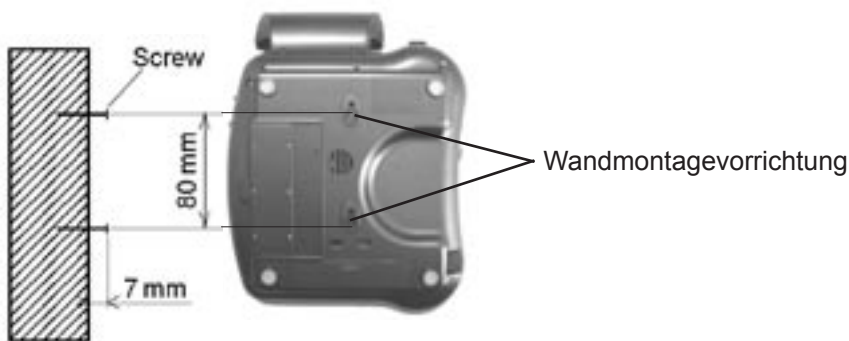




Die Schrauben sollten dabei 6-7mm von der Wand abste-
hen. Hängen Sie das Telefon über die Schraubenköpfe und
ziehen Sie es nach unten um es zu sichern.

INBETRIEBNAHME

1- RUFTONEINSTELLUNG




Ein Schalter an der rechten Seite des Telefons ermöglicht es den Klingelton auf Hoch (HI), Niedrig (LOW) oder Aus (OFF) ein zu stellen:

-  Aus (OFF)
-  Niedrig (LOW)
-  Hoch (HI)

Das Telefon ist ab Werk auf die Klingellautstärke „Hoch“ eingestellt.

Wenn Ihnen die Klingeltonmelodie oder -lautstärke nicht gefällt, können Sie eine neue auswählen, indem Sie die Einstellungen auf folgende Weise verändern:




Bei aufgelegtem Hörer:

- Drücken sie die  Taste.
- Verwenden Sie die  oder  Tasten um „Telefoneinstellung“ auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste zum Bestätigen.
- Wählen Sie „Klingeltonmelodie“
- Wählen Sie die gewünschte Melodie
- Drücken Sie die **OK**-Taste um zu bestätigen.
- Der neue Klingelton ertönt.
- Drücken Sie die **C-Taste** dreimal um das Menü zu verlassen.

INBETRIEBNAHME

2 - ALARM- UND KLINGELTONEINSTELLUNG

Ein dreifach verstellbarer Schalter auf der rechten Seite des Telefons erlaubt folgende Einstellungen:

-  Klingel und Blitzlicht sind aktiviert.
-  Klingel und Vibrationsalarm sind aktiviert.
-  Klingel, Vibrationsalarm und Blitzlicht sind aktiviert.

3 - EINSTELLEN VON TON- UND PULSWAHL

Das Telefon ist ab Werk auf Tonwahl eingestellt. Alle Anschlüsse in Deutschland funktionieren heutzutage mit Tonwahl. Sollten Sie dennoch Probleme haben einen Anruf zu tätigen, betreiben Sie das Telefon eventuell an einer älteren Telefonanlage. In diesem Fall stellen Sie Ihr Telefon bitte auf Pulswahl.

INBETRIEBNAHME

4 - UMSCHALTEN ZWISCHEN ANRUFSSIGNALISIERUNG UND „WARTENDE NACHRICHT“

„**Wartende Hotelnachricht**“ wird mit neuen Diensten verwendet, die beispielsweise in Hotelnetzwerken angeboten werden. Die Anrufsignalisierung wird verwendet um einen eingehenden Anruf zu signalisieren.

Ein unten an Ihrem Telefon befindlicher Schalter „ „ erlaubt Ihnen die Anrufsignalisierung & „**wartende Hotelnachricht**“ – Funktionen ein und aus zu schalten. Wenn der Schalter auf „**ON**“ steht, wird das Licht der Anrufsignalisierung blinken, wenn ein neuer Anruf eingeht.

Steht der Schalter auf „**OFF**“ und es geht eine Nachricht für Sie ein, zeigt Ihnen das rote Licht, dass für Sie eine neue Nachricht (beispielsweise vom Hotel) auf Ihrem Telefon wartet.

5 - WÄHLEN SIE DAS DATUMS- UND STUNDENFORMAT

Datumsformat

Sie können zwischen 2 Formaten wählen:

Tag – Monat oder Monat – Tag.

Bei aufgelegtem Hörer

- Drücken Sie die  Taste
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.einst.**“




INBETRIEBNAHME

- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie „**Datumsanzeig**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie „**Tag – Monat**“ oder „**Monat – Tag**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Drücken Sie die C-Taste zweimal um das Menü wieder zu verlassen

Stundenformat

Sie können zwischen zwei Formaten wählen:
12 Stunden oder 24 Stunden

Bei aufgelegtem Hörer,






- Drücken Sie die  Taste
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.einst.**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie „**Std.anzeige**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie „**12 Std.**“ oder „**24 Std.**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Drücken Sie die C-Taste zweimal um das Menü zu verlassen

Wenn Sie die 12 Stunden-Anzeige wählen, wird der Vormittag mit „**AM**“, der Nachmittag mit „**PM**“ angezeigt.

INBETRIEBNAHME

6 - EINSTELLEN VON DATUM UND STUNDE

Bei aufgelegtem Hörer

- Drücken sie die  Taste
- Wählen Sie mit  oder  „Zeiteinst.“ Bestätigen Sie mit „OK“
- Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Ziffer
- Bestätigen Sie mit „OK“ und wechseln Sie damit zur nächsten Stelle

Sie stellen die Zeit so ein:

STUNDE – MINUTE – MONAT – TAG

- Drücken Sie die C-Taste zweimal um das Menü wieder zu verlassen

Achtung: Diese Parameter werden sich bei Erhalt des ersten Anrufes automatisch einstellen, wenn Sie über einen digitalen Anschluss verfügen.




7 - SPRACHE EINSTELLEN

Sie können zwischen 16 verschiedenen Sprachen – inklusive Englisch, Französisch und Deutsch– wählen.

INBETRIEBNAHME

Um die Sprache zu wechseln, folgen Sie den aufgeführten Anweisungen:

Bei aufgelegtem Hörer,

- Drücken Sie die  Taste
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.einst.**“
- Bestätigen Sie mit **OK**
- Wählen Sie „**Sprache**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie „**French**“ (zum Beispiel)
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Drücken Sie die **C-Taste** zweimal um das Menü wieder zu verlassen

8 - EINSTELLEN DES DISPLAYKONTRASTS

Ihr Display hat eine Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch nach 15 Sekunden Inaktivität ausschaltet.

Folgen Sie einfach den aufgeführten Anweisungen um den Kontrast zu erhöhen oder zu reduzieren.

Bei aufgelegtem Hörer,

- Drücken Sie die  Taste
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.einst.**“

INBETRIEBNAHME

- Bestätigen Sie mit **OK**
- Wählen Sie „**LCD Kontrast**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie den gewünschten Kontrast mit ▲ oder ▼
- Drücken Sie die C-Taste zweimal um das Menü wieder zu verlassen

9 - AUTOMATISCHES AUFLEGEN

Diese Funktion unterbricht den Anruf nach 8 Sekunden, wenn die Leitung belegt ist.

Bei aufgelegtem Hörer,








- Drücken Sie die ☒ Taste
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „**Tel.einst**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „**Auto Aufleg.**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „**AN**“ oder „**AUS**“ um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Drücken Sie die **C-Taste** zweimal um das Menü wieder zu verlassen

INBETRIEBNAHME

10 - AUTOMATISCHE DISPLAYANPASSUNG

Wenn die automatische Display-Größeneinstellung aktiviert ist, kann das Display bis zu 18 Zeichen der Nummer die Sie wählen anzeigen. Im Normalfall werden nur 8 angezeigt.

Bei aufgelegtem Hörer






- Drücken Sie 
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.einst.**“
- Bestätigen Sie mit **OK**
- Wählen Sie mit  oder  „**DIM: X---->x**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie mit  oder  „**AN**“ oder „**AUS**“ um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Drücken Sie die **C-Taste** zweimal um das Menü wieder zu verlassen

INBETRIEBNAHME

11 – EINSTELLEN DER FLASH-ZEIT („R“)

Ihr Telefon arbeitet mit einer Hook-Flash-Zeit (R=100ms)
Falls Sie die Flashzeit ändern wollen, folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.

Bei aufgelegtem Hörer,

- Drücken Sie die  Taste
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.einst.**“
- Bestätigen Sie mit OK
- Wählen Sie mit  oder  „**Flash**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie eine neue Einstellung. 300 oder 600ms
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Drücken Sie die **C-Taste** zweimal um das Menü wieder zu verlassen

DAS TELEFON BENUTZEN

Ihr CL400 erlaubt Ihnen freihändig zu sprechen. Umstehende Personen können dann die Unterhaltung mitverfolgen.

1 – EINEN ANRUF ANNEHMEN



Bei einem eingehenden Anruf wird Ihr Telefon klingeln und sofern vom Netzbetreiber unterstützt die Nummer und/oder den Namen des Anrufers im Display anzeigen.

1. Möglichkeit

- Heben Sie den Hörer ab und sprechen Sie
- Nach Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer vorsichtig zurück auf die Gabel um die Leitung wieder freizugeben.

2. Möglichkeit

Sie können die Freisprech - Funktion zum Sprechen mit Ihrem Anrufer nutzen

- Drücken Sie  um mit Ihrem Telefonpartner freihändig zu sprechen
- Drücken Sie  erneut um das Gespräch zu beenden und die Leitung wieder freizugeben.

DAS TELEFON BENUTZEN

2 – EINEN ANRUF TÄTIGEN

1. Möglichkeit

- Heben Sie den Hörer ab
- Warten Sie auf das Freizeichen und wählen Sie die gewünschte Nummer (die Nummer wird im Display angezeigt)
- Nach Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer vorsichtig zurück auf die Gabel um die Leitung wieder freizugeben



2. Möglichkeit (Vorwählen)

- Wählen Sie die gewünschte Nummer bei aufgelegtem Hörer
- Die „C“ Taste erlaubt Ihnen falsche Ziffern zu löschen, während Sie wählen
- Heben Sie den Hörer ab
- Die Nummer wird nun automatisch gewählt
- Nach Beenden des Gespräches, legen Sie den Hörer vorsichtig zurück auf die Gabel um die Leitung wieder freizugeben




3. Möglichkeit (Freisprechen)

Sie können die Freisprech - Funktion nutzen um einen Anruf zu tätigen.

DAS TELEFON BENUTZEN

- Wählen Sie die gewünschte Nummer bei aufgelegtem Hörer
- Die „C“ Taste erlaubt Ihnen falsche Ziffern zu löschen, während sie wählen
- Drücken Sie  und die Nummer wird automatisch gewählt
- Wenn der Angerufene Ihnen antwortet, sprechen Sie einfach in das Mikrofon an der Unterseite Ihres Telefons.
- Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit dem Regler an der linken Seite Ihres Telefons einstellen
- Nach Beenden des Gesprächs, drücken Sie einfach  um die Leitung wieder freizugeben

Notiz: Um die Freisprech-Funktion während eines Gesprächs zu deaktivieren, heben Sie einfach den Hörer ab.

Das Symbol  erlischt und das Symbol  erscheint. Um die Freisprech-Funktion während eines Telefonats zu aktivieren, drücken Sie  und halten Sie die die Taste gedrückt während Sie den Hörer auflegen.


DAS TELEFON BENUTZEN

Die Anzeige der Anrufzeit wird einige Sekunden nach Aufbau der Verbindung gestartet.



- Um den Zähler zu stoppen, drücken Sie „C“
- Wenn Sie „C“ zweimal drücken, wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt

3 – DEN VERSTÄRKER BENUTZEN

Wenn Sie die Verstärker-Funktion während eines Telefonats über den Lautsprecher nutzen möchten:



- Drücken Sie 
- Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der linken Seite Ihres Telefons ein

Wenn Sie während eines Telefonats die Freisprech-Funktion aktivieren möchten:

- Drücken Sie  und halten Sie die Taste gedrückt während Sie den Hörer auflegen
- Lassen Sie danach die  Taste wieder los
- Die Freisprech-Funktion ist nun aktiviert

4 – WAHLWIEDERHOLUNG

Mit dieser Funktion kann die zuletzt gewählte Nummer noch einmal angerufen werden.

- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder 
- Warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie die

DAS TELEFON BENUTZEN


Wahlwiederholungstaste 

- Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch wiedergewählt (gilt nicht für Kurzwahltasten)
- Bestätigen Sie mit „**OK**“

5 – WIEDERWAHL EINER DER 30 ZULETZT GEWÄHLTEN NUMMERN

Sie können die 30 zuletzt gewählten Nummern wieder aufrufen. Um eine davon noch einmal anzurufen, folgen Sie den Anweisungen:

Bei aufgelegtem Hörer,

- Drücken Sie „**OK**“
- Im Display wird „**gewählt**“ angezeigt, die zuletzt gewählte Nummer, die Gesamtzahl der Nummern sowie Datum und Uhrzeit der gespeicherten Einträge Suchen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer aus der Liste
- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie 
- Die ausgewählte Nummer wird nun automatisch gewählt

6 – LÖSCHEN EINER DER 30 ZULETZT GEWÄHLTEN NUMMERN




Bei aufgelegtem Hörer,

DAS TELEFON BENUTZEN

- Drücken Sie „OK“
- Im Display erscheint „gewählt“
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer aus dem Speicher
- Drücken Sie „C“
- Im Display erscheint „LÖSCHEN ?“
- Bestätigen Sie durch erneutes drücken der „C“ Taste
- Drücken Sie „OK“ um das Menü zu verlassen

7 – STUMMSCHALTFUNKTION

Falls gewünscht können Sie mit jemandem im Raum privat sprechen, ohne dass Ihr Telefonpartner Sie hört. Während der Stummschaltung können Sie Ihren Telefonpartner weiterhin hören, nur er Sie nicht mehr.

- Während des Telefonats drücken Sie 
- Im Display erscheint  „X“
- Ihr Gesprächspartner kann Sie nun nicht mehr hören
- Drücken Sie  um das Telefongespräch fortzusetzen

8 – R-TASTE, * UND # - TASTE

Diese Tasten werden für Sonderfunktionen verwendet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach Details.

DAS TELEFON BENUTZEN

9 – EINE TELEFONNUMMER SPEICHERN


Ihr Telefon verfügt über 8 Direktwahlspeicherplätze inklusive 3 Speicherplätzen für Notfallnummern (max. 30 Zeichen pro Nummer)

Die 3 Notfalltasten P1, P2, P3 erlauben Ihnen beispielsweise die 3 folgenden Nummern zu speichern:

- 110 (Notruf Polizei)
- Ihr Arzt
- 112 (Notruf Notarzt/Feuerwehr) T

Es wird empfohlen diese Nummern gleich während der Einrichtung des Telefons zu speichern



Um eine Nummer zu speichern folgen Sie den aufgeführten Anweisungen:

- Heben Sie den Hörer ab
- Drücken Sie 
- Wählen Sie die Nummer
- Drücken Sie **M1**, **M2**, ..., oder **M8** oder eine der 3 Notfalltasten **P1**, **P2**, **P3** um die Nummer zu speichern
- Im Display erscheint „**Speichern ok**“

Notiz: Ist Ihr Telefon mehrere Stunden ohne Stromversorgung, gehen die gespeicherten Nummern verloren. Speichern Sie eine neue Nummer, wird die vorher dort gespeicherte Nummer automatisch gelöscht.

DAS TELEFON BENUTZEN

10 – GESPEICHERTE NUMMERN WÄHLEN


- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder  und warten Sie auf das Freizeichen
 - Drücken Sie die entsprechende Taste **M1**, **M2**, ..., oder **M8** oder eine der 3 Notfalleinstellen **P1**, **P2**, **P3**
 - Die Nummer wird nun automatisch gewählt
- Um die gespeicherten Nummern aufzulisten, nutzen Sie die Indekarte unter Ihrem Telefon. Nutzen Sie diese Tabelle um Ihr Telefonbuch zu erstellen.


	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	


Pierre	1	01 64 57
--------	---	----------------

DAS TELEFON BENUTZEN


11 – BENUTZUNG DES KOPFHÖRERS MIT MIKROFON (OPTIONAL)

Kopfhörer: Wenn Sie einen Anruf mit einem Geemarc Headset entgegennehmen oder damit einen Anruf tätigen wollen, stecken Sie den Stecker des Headsets in die  Buchse auf der Rückseite Ihres Telefons.

- Drücken Sie  um das Freizeichen zu bekommen
- Wählen Sie die Nummer

Achtung: Sie können die Lautstärke und den Ton mit den **VOLUME** und **tone** Reglern oben an Ihrem Telefon einstellen (sofern die Funktion aktiviert ist) sowie die Sendelautstärke mit dem  Schalter (3 Positionen) auf der rechten Seite Ihres Telefons.


12 – BENUTZUNG DER INDUKTIONSSCHLEIFE (OPTIONAL)

Induktionsschleife: Wenn Sie einen Anruf mit einer Induktionsschleife annehmen oder damit einen Anruf tätigen wollen, stecken Sie den Stecker in die  –Buchse auf der Rückseite Ihres Telefons. Die Induktionsschleife ist nun bereit.


DAS TELEFON BENUTZEN

Sie haben 3 Verwendungsmöglichkeiten:

1. Möglichkeit:

Drücken Sie  um die Induktionsschleife und den Kopfhörer zu aktivieren, sprechen Sie in das Mikrofon des Kopfhörers.

2. Möglichkeit:


Drücken Sie  um die Induktionsschleife und die Lautsprecher zu aktivieren und sprechen Sie in das Mikrofon an der Unterseite Ihres Telefons.

3. Möglichkeit:

Heben Sie den Hörer ab und sprechen Sie in die Muschel.

Achtung: Um die Induktionsschleife nutzen zu können, muss das Telefon am Strom angeschlossen sein. Sie können auch die Empfangslautstärke einstellen.

13 – BENUTZUNG DES VIBRATIONSKISSENS (OPTIONAL)

Das Vibrationskissen: Wenn Sie Ihr Telefon durch ein Vibrationskissen ergänzen wollen, schließen Sie das Geemarc Vibrationskissen an indem Sie den Stecker in die  Buchse auf der Rückseite Ihres Telefons stecken. Wenn ein Anruf


SENDELAUTSTÄRKE

eingeht, wird das Vibrationskissen während des Klingelns aktiviert.

Achtung: Diese Option muss unter dem Punkt „Alarm- und Klingeltoneinstellungen“ (S. 12) aktiviert sein.
Wichtig: Schließen Sie zu Ihrer Sicherheit nur das Geemarc Vibrationskissen an. Andere Geräte können das Telefon beschädigen.


1 – SENDELAUTSTÄRKE EINSTELLEN


Wenn Ihre Stimme leise ist oder Ihre Telefonpartner Schwierigkeiten haben Sie zu hören, können Sie die Sendelautstärke mit dem Schalter an der rechten Seite heraufsetzen. Sie können die Sendelautstärke gegebenenfalls natürlich auch herabsetzen.

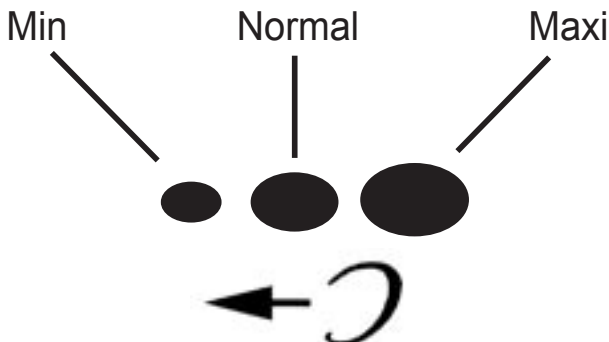


EMPFANGLAUTSTÄRKE UND HOCH-/TIEFTONREGELUNG

1 - EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE UND DER HÖHEN UND TIEFEN


Sie können die Hörerlautstärke sowie die Höhen und Tiefen Ihren eigenen Hörbedürfnissen entsprechend einstellen. Durch die Taste  wird die extra Verstärkung während des Gesprächs aktiviert.

Wenn die extra Verstärkung aktiviert ist, leuchtet das rote Licht neben der  Taste.


Stellen Sie Lautstärke und die Höhen und Tiefen mit den **tone** und **volume** – Tasten entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen ein.

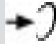Achtung: Die Lautstärkeeinstellung von 15dB – 30dB ist nur möglich, wenn der  Knopf auf **ON** steht. Steht er auf **OFF**, kann die Lautstärke nur im Bereich 0dB – 15dB eingestellt werden. In beiden Fällen wird die Lautstärke durch drücken der Verstärkertaste am Hörer zusätzlich um 15dB angehoben.

SENDELAUTSTÄRKE

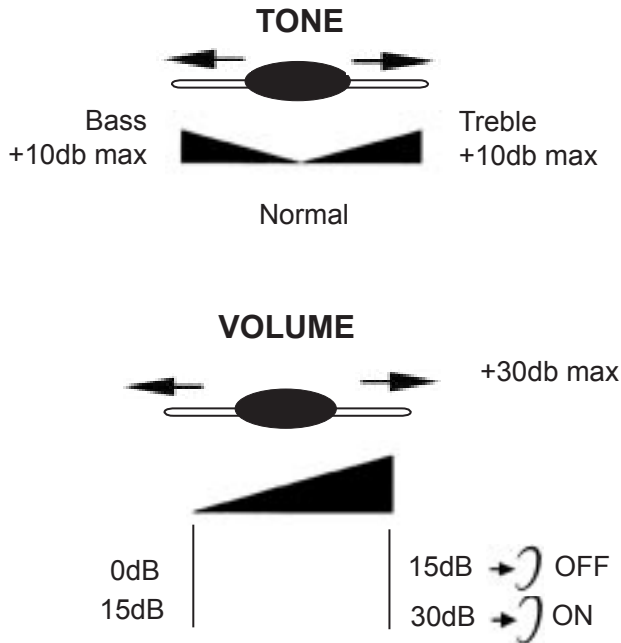

Achtung: Wenn die Hoch-/Tiefenregelung (Treble), die Hörlautstärke und Sendelautstärke auf Maximum stehen, kann ein Pfeifen auftreten. Sollte ein Pfeifen auftreten, empfiehlt es sich die Sendelautstärke herabzusetzen (Sendelautstärke-Schalter ●●● auf der rechten Seite).




Wenn der Schalter  auf der Rückseite Ihres Telefons auf **ON** steht, sind die Verstärkerfunktionen automatisch jedes Mal bei Benutzen des Telefons aktiviert. Steht der Schalter auf **OFF**, müssen Sie Funktion durch drücken des Schalters aktivieren.

TELEFONBUCH

1 – EINEN TELEFONBUCH-EINTRAG ERSTELLEN

Sie können 99 Einträge mit Name und Telefonnummer in Ihrem Telefonbuch speichern.

Bei aufgelegtem Hörer


- Drücken Sie 
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.buch**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Wählen Sie „**hinzufügen**“
- Bestätigen Sie mit „**OK**“
- Geben Sie die Nummer ein
(max. 30 Zeichen pro Eintrag)
- Löschen Sie falsche Ziffern mit „**C**“
- Wenn die Nummer richtig ist, bestätigen Sie mit „**OK**“
und geben Sie den zugehörigen Namen ein
- Wählen Sie den gewünschten Buchstaben durch drücken der entsprechenden Taste

Sie können die unten stehende Tabelle oder die auf der Tastatur befindlichen Buchstaben zur Hilfe verwenden.

TELEFONBUCH

Taste	Zeichen	Ki-Taste	Zeichen
1	1 . , ? - " ' <	6	M N O m n o 6 Ö Ø
2	A B C a b c 2 Æ Ø	7	P Q R S p q r s 7
3	D E F d e f 3	8	T U V t u v 8 Ü
4	G H I g h i 4	9	W X Y Z w x y z 9
5	J K L j k l 5	0	0 + & @ / \$ %

- Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken sie 2x „OK“
- Wenn der nächste Buchstabe der gleiche wie der Letzte ist (oder sich auf der gleichen Taste befindet), drücken Sie erst „OK“ um eine Stelle weiter zu kommen und wählen Sie dann den gewünschten Buchstaben.
- Löschen Sie einen falschen Buchstaben mit „C“
- Wenn die Nummer richtig ist, drücken Sie 3 Sekunden die „OK“-Taste um Nummer und Name zu bestätigen
- Nun können Sie einen weiteren Eintrag erstellen
- Drücken Sie „C“ um das Menü zu verlassen

Achtung: Wenn Sie eine Pause in die gespeicherte Nummer einfügen wollen, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste  beim Eingeben der Nummer (ein P wird im Display angezeigt).

TELEFONBUCH

2 – EINEN EINTRAG VON DER LISTE DER EINGEGANGENEN ANRUFE ERSTELLEN

Wenn Ihr Telefonanschluss die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers unterstützt, haben Sie die Möglichkeit einen Eintrag aus der Liste der eingegangenen Anrufe zu erstellen, weil jeder Anruf in Ihrem Telefon mit Nummer gespeichert ist.






Bei aufgelegtem Hörer

- Entgangene Anrufe werden auf Ihrem Display angezeigt
- Wählen Sie die gewünschte Nummer mit ▲ oder ▼
- Drücken Sie „OK“ und halten Sie die Taste gedrückt bis die letzte Ziffer blinkt
- Drücken Sie „OK“
- Sie können den zugehörigen Namen jetzt eingeben oder ändern oder halten Sie 3 Sekunden „OK“ gedrückt um den angezeigten Namen zu bestätigen.
- Drücken Sie „C“ um das Menü zu verlassen

TELEFONBUCH






3 – EINEN TELEFONBUCH-EINTRAG LÖSCHEN

Bei aufgelegtem Hörer

- Drücken Sie 
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.buch**“, dann „**Übersicht**“
- Wählen Sie mit  oder  die Nummer, die Sie löschen möchten
- Drücken Sie „**C**“
- Im Display erscheint „**LÖSCHEN ?**“
- Bestätigen Sie mit „**C**“
- Verlassen Sie das Menü mit „**OK**“

4 – ÄNDERN EINES TELEFONBUCH-EINTRAGS

Bei aufgelegtem Hörer








- Drücken Sie 
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.buch**“, dann „**Übersicht**“
- Drücken Sie „**OK**“
- Wählen Sie mit  oder  die Nummer, die Sie ändern möchten
- Drücken Sie „**OK**“ und halten Sie die Taste gedrückt, bis die letzte Ziffer blinkt
- Drücken Sie „**C**“ um die Nummer zu ändern und/oder geben Sie eine neue Nummer ein

TELEFONBUCH

- Drücken Sie „**OK**“
- Sie können nun den Namen ändern
- Drücken Sie „**C**“ um einen Buchstaben zu löschen
- Für Hilfe schauen Sie nach unter „**Einen Telefonbucheintrag erstellen**“ (S. 34)
- Halten Sie zum Bestätigen die „**OK**“ Taste für 3 Sekunden gedrückt
- Drücken Sie „**C**“ zum Verlassen des Menüs

5 – EINEN TELEFONBUCH-EINTRAG ANRUFEN

Bei aufgelegtem Hörer


- Drücken Sie 
- Wählen Sie mit  oder  „**Tel.buch**“ dann „**Übersicht**“ dann drücken Sie „**OK**“
- Wählen Sie mit  oder  die Nummer, die Sie anrufen möchten. Sie können Einträge auch schneller finden indem Sie einfach den ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder 
- Die Nummer wird nun automatisch gewählt

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN


Achtung: Sie können die Liste der entgangenen Anrufe während eines Gespräches durch Drücken der „OK“ Taste einsehen. Dann bewegen Sie sich mit ▲ und ▼ durch die Liste.

1 – NUTZEN DER LISTE DER ENTGANGENEN ANRUFE

Zusammen mit der Funktion Rufnummernanzeige ermöglicht Ihnen die Anruferliste die entgangenen Anrufe zu speichern. Wenn der Speicher der Liste voll ist, wird ein neuer Anruf den Platz des ältesten Eintrags einnehmen. Alle Anrufe werden mit Datum, Uhrzeit und in Reihenfolge ihres Eingangs gespeichert.

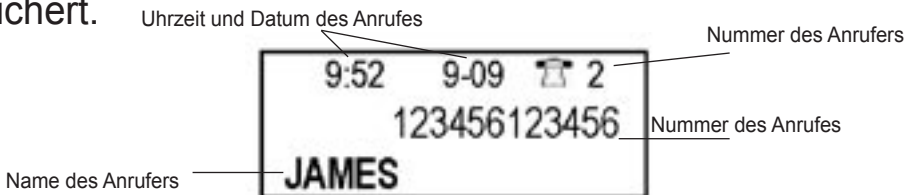


Notiz: Falls der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrückt, wird auf dem Display **PRIVATE** angezeigt.

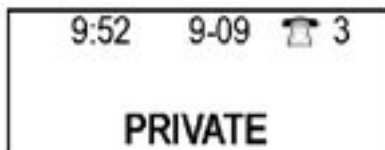


LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN

Ist die Nummer des Anrufers unbekannt (z. B. bei Anrufen aus dem Ausland), erscheint im Display **OUT OF AREA**:

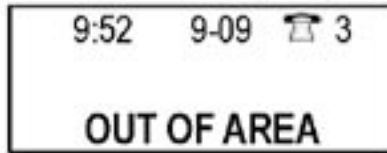


Ruft der gleiche Anrufer mehrmals an, wird nur der letzte Anruf in der Liste der eingegangenen Anrufe gespeichert und im Display erscheint ein +.

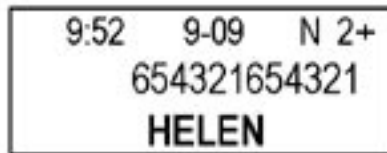

Notiz: Während Sie die Einträge durchsehen, erscheint im Display ein N für Einträge, die Sie noch nicht angesehen haben.


Wenn ein neuer Anruf oder mehrere neue Anrufe eingegangen sind, blinkt das „neuer Anruf“ - Lämpchen und im Display erscheint:

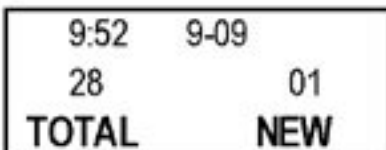


Dieses Beispiel zeigt, dass die Gesamtzahl aller Anrufe der Liste der eingegangenen Anrufe 28 ist und davon ist 1 Eintrag neu.

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN

Um die neuen Anrufe einzusehen, nutzen Sie ▲ oder ▼.

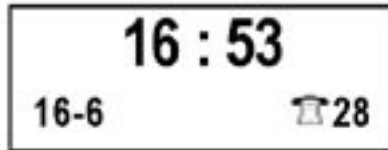

Wenn alle neuen Anrufe angesehen wurden, erlischt das „neuer Anruf“ - Lämpchen und das Display kommt nach einigen Sekunden zur Ausgangsanzeige zurück. Die Gesamtzahl der Einträge der entgangenen Anrufe wird weiter im Display angezeigt.

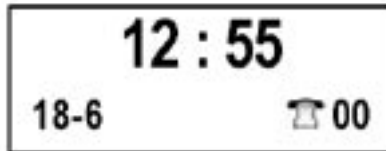

Ist die Liste der entgangenen Anrufe leer (weil gespeicherte Einträge gelöscht wurden beispielsweise) zeigt das Display 00 an.



2 – WÄHLEN DER NUMMER EINES ENTGANGENEN ANRUFES

Sie haben 2 Möglichkeiten:



Bei aufgelegtem Hörer,

- Suchen Sie mit ▲ oder ▼ in der Liste die Nummer die Sie wählen möchten

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN

- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder 
- Die Nummer wird nun automatisch gewählt



Heben Sie den Hörer ab,

- Suchen Sie mit  oder  in der Liste die Nummer die Sie wählen möchten
- Drücken Sie „**OK**“
- Die Nummer wird nun automatisch gewählt

Notiz: Die Rückruffunktion der Liste der eingegangenen Anrufe ist nicht möglich bei Einträgen, die als **PRIVATE** oder **OUT OF AREA** gespeichert wurden.

3 – LÖSCHEN EINES EINTRAGS DER ANRUFERLISTE

Bei aufgelegtem Hörer

- Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus der Liste
- Drücken Sie „**C**“
- Im Display erscheint „**LÖSCHEN?**“
- Drücken Sie zum Bestätigen erneut „**C**“
- Drücken Sie „**OK**“ um das Menü wieder zu verlassen

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN

4 – LÖSCHEN ALLER EINTRÄGE DER ANRUFERLISTE

- Hörer aufgelegt
- Drücken Sie ▲ oder ▼
- Drücken Sie „C“ und halten Sie die Taste gedrückt bis im Display „**ALL. LÖSCH.?**“ erscheint
- Bestätigen Sie mit „C“

5 – ANKLOPFEN

Mit dieser Funktion gehen Sie sicher, dass ein eingehender Anruf Sie auch erreicht, während Sie telefonieren. Sie können diesen 2. Anruf entgegennehmen und zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln. Um diese Funktion aktivieren zu können, müssen Sie diesen Service bei Ihrem Netzanbieter angemeldet haben.

Die Werkseinstellung für die Anklopf-Funktion ist AUS. Um sie zu aktivieren, folgen Sie den Anweisungen:

Bei aufgelegtem Hörer


- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „**Set Phone**“
- Drücken Sie „**OK**“
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „**Eingeg.Anruf**“
- Drücken Sie „**OK**“
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „**AN**“

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN


- Drücken Sie „**OK**“
- Drücken Sie 2x „**C**“ um das Menü zu verlassen

Notiz: Wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist und Sie diese gerne deaktivieren möchten, wählen Sie einfach „**AUS**“ im Menüpunkt „

- Wenn Sie mit Anrufer 1 sprechen, werden seine Informationen (Name & Nummer) im Display angezeigt

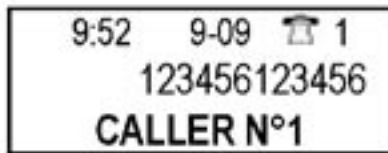

- Wenn der 2. Anruf eingeht, hören Sie einen Piep-Ton als Anklopfsignal und im Display erscheinen die Anruferinformationen (Name & Nummer) von Anrufer 2.

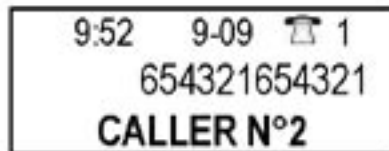

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN

6 – WARTENDE NACHRICHT

Dieses System bietet dem Anrufer die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.

Sie werden in der Liste der eingegangenen Anrufe mit einem Eintrag darüber informiert, dass eine Nachricht auf Sie wartet. Dieser Anruf ist getrennt von anderen Anrufen und im Display erscheint „Wart. Nachr.“ und das Lämpchen für die wartenden Nachrichten leuchtet.

Notiz: „Wart. Nachr.“ wird angezeigt um zu signalisieren, dass die Nachricht noch nicht gelesen wurde. Nachdem die Nachricht angesehen wurde, wird auch „MSG waiting“ nicht mehr angezeigt.

LEISTUNGSMERKMALE IN DIGITALEN NETZEN

Für mehr Informationen rund um die Anklopf-Funktion fragen Sie Ihren Netzanbieter.

Notiz: Wenn Sie den anklopfenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Liste der eingegangenen Anrufe gespeichert. So können Sie später zurückrufen



Für Hilfe und Informationen zu unseren Produkten, besuchen Sie unsere Website

www.geemarc.com

Tel : + 33 (0) 3 28 58 75 75

Fax : + 33 (0) 3 28 58 75 76

GARANTIE

GARANTIE

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine einjährige Garantie ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage www.geemarc.com. Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden. Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3, erfüllt.

Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.