




PowerTel 500

Bedienungs-
anleitung



PowerTel 500 Mobilteil und Basisstation

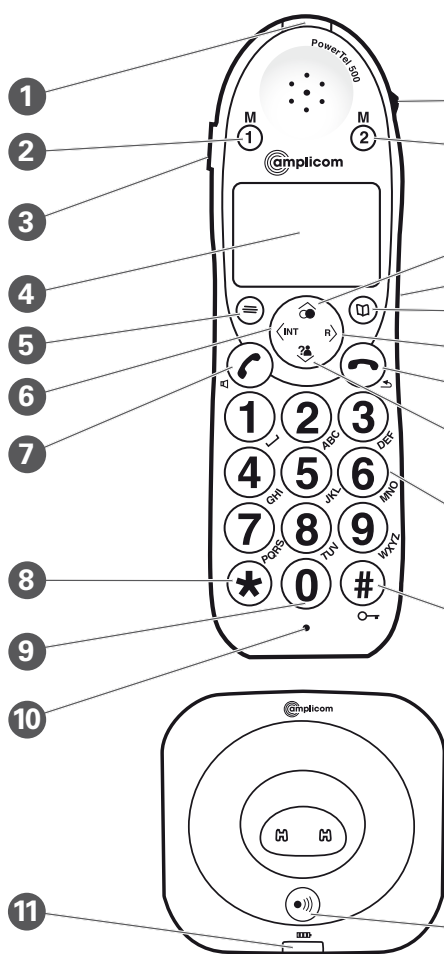


- 1 Lampe für eingeh. Anruf
- 2 Speicher 1
- 3 35 dB Verstärker
- 4 Display
- 5 Menü/Stumm/Lösch
- 6 Intern-Taste
- 7 Ext. Anruf/Freisprechen
- 8 *Rufton ein/aus
- 9 Pause (lang = 0 drücken)
- 10 Mikrofon
- 11 Eingehender Anruf/Lädt/Leitung besetzt
- 12 Lautstärke +/-
- 13 Speicher 2
- 14 N. oben/Wahlwiederh.
- 15 Headset-Buchse (Headset nicht im Lieferumfang)
- 16 Telefonb./Speichern/OK
- 17 R-Taste
- 18 Anruf beenden
- 19 N. unten/Anrufliste/Klangregler
- 20 Tastatur
- 21 #/Tastatursperre
- 22 Mobilteil suchen/Anmelden

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

PowerTel 502 Mobilteil und Ladeschale

Zum Lieferumfang des PowerTel 502 gehören zusätzlich dieses Telefon und die Ladeschale.

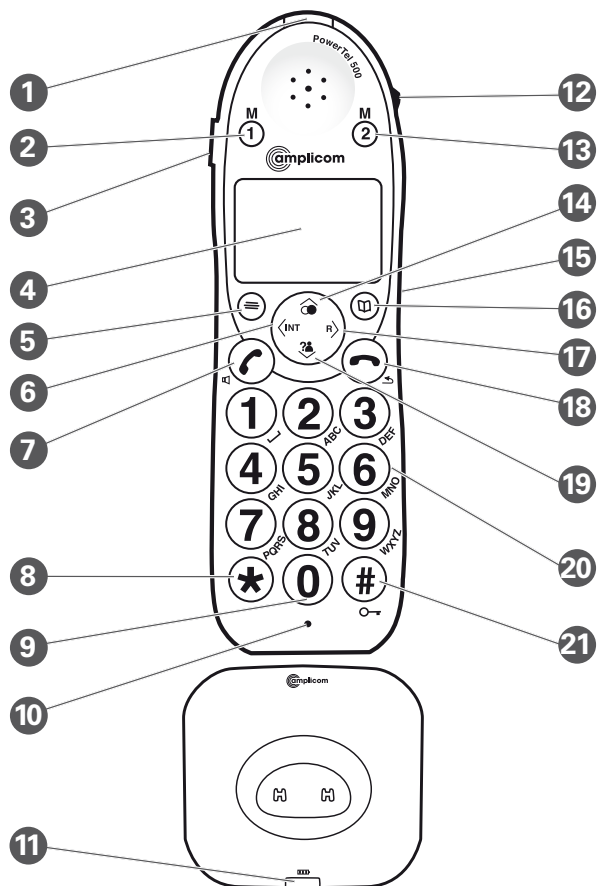

- 1 Lampe für eingeh. Anruf
- 2 Speicher 1
- 3 35 dB Verstärker
- 4 Display
- 5 Menü/Stumm/Lösch
- 6 Intern-Taste
- 7 Ext. Anruf/Freisprechen
- 8 */Rufton ein/aus
- 9 Pause (lang = 0 drücken)
- 10 Mikrofon
- 11 Lädt
- 12 Lautstärke +/-
- 13 Speicher 2
- 14 N. oben/Wahlwiederh.
- 15 Headset-Buchse (Headset nicht im Lieferumfang)
- 16 Telefonb./Speichern/OK
- 17 R-Taste
- 18 Anruf beenden
- 19 N. unten/Anrufliste/Klangregler
- 20 Tastatur
- 21 #/Tastatursperre

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme	7	Telefonnummer aus dem	
Verpackungsinhalt prüfen	8	Telefonbuch wählen	19
Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten.....	9	Telefonnummer per Kurzwahltaste wählen	19
Basisstation anschließen	9	Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil.....	20
Batterien einsetzen.....	10	Hörerlautstärke verstärken.....	20
Mobilteil aufladen.....	10	Freisprecheinrichtung	20
Telefonanschlussschnur einstecken	10	Freisprech-Modus.....	20
Nur für Benutzer des PowerTel 502	11	Sprechzeitanzeige.....	21
Gürtelclip befestigen.....	12	Headset (nicht im Lieferumfang enthalten).....	21
Symbole im Display des Mobilteils..	13	Stummschaltung	21
Navigation im Menü	15	Stummschalten des Mikrofons am Mobilteil.....	21
Verwendung der Menüs.....	15	Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil.....	21
Telefonieren	17	Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren	22
Anrufen.....	18	Interne Anrufe	22
Anruf beenden	18	Externen Anruf intern weiterleiten...	23
Anruf annehmen.....	18	Konferenzgespräche führen.....	23
Wahlwiederholung	18		
Verpasste Anrufer zurückrufen.....	19		

Mobilteil anmelden.....	24	Tastenton ein-/ausschalten	34
Mobilteil abmelden.....	24	Kontrast ändern	35
Mobilteil abmelden am Mobilteil.....	25	Direktannahme aktivieren oder deaktivieren.....	35
Mobilteil suchen	25	Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern.....	36
Stromausfall – was ist zu tun	25	Bestätigungston ein-/ausschalten	36
Umgang mit dem Menü	28	Basis wählen	37
Prioritäts-/Standardeinstellung.....	28	Sprache ändern.....	37
Benutzerprofile.....	28	Datum/Uhrzeit ändern	38
Profilnamen ändern	28	Format der Zeitanzeige ändern	38
Hörerlautstärke im Profil ändern	29	Alarm einstellen.....	39
Verstärkereinstellung im Profil ändern.....	29	Nachtlicht ein-/ausschalten.....	39
Klangreglereinstellung im Profil ändern.....	30	Einstellung der Basisstation	40
Profil kopieren	30	Klingelton der Basisstation ändern ..	40
Profil auswählen	31	Ruftonlautstärke der Basisstation ändern.....	40
Klingelton ändern	32	System-PIN ändern	41
Ruftonlautstärke ändern	32	Umgang mit dem Telefonbuch	42
Klang regulieren	33	Einträge über die Tastatur eingeben.....	42
Verstärkung dauerhaft aktivieren	33		
Name des Mobilteils ändern.....	34		

Telefonbucheinträge speichern	43	Zusätzliche Leistungsmerkmale	
Telefonbucheintrag bearbeiten.....	43	nutzen	53
Telefonbucheinträge einzeln oder alle		Wählmodus einstellen.....	53
löschen	44	Wählmodus ändern	53
Telefonbucheinträge auf anderes		Auf Standardeinstellungen	
Telefon kopieren	44	zurücksetzen.....	54
Umgang mit dem		Falls Probleme auftauchen.....	55
Kurzwahlspeicher.....	46	Fehlersuche	56
Kurzwahleintrag speichern	46	Allgemeine Informationen.....	59
Kurzwahleintrag bearbeiten.....	46	Sicherheitsinformationen.....	60
Kurzwahleintrag löschen.....	47	Entsorgung	62
Umgang mit der Anrufliste	48	Technische Daten.....	63
Einträge aus der Anrufliste im		Standardeinstellungen	64
Telefonbuch ablegen	49	Wartung und Garantie.....	65
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste		Konformitätserklärung	66
löschen	49	Stichwortverzeichnis	67
Alle Einträge aus der Anrufliste			
löschen	50		
Verwendung des Telefons in einer			
Nebenstellenanlage	51		
Flash-Zeit einstellen am Mobilteil	52		
Wählpause einfügen.....	52		

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 60.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang eines PowerTel 500 gehören:

- 1 Basisstation
- 1 Schnurlostelefon (Mobilteil)
- 1 Batteriefachdeckel
- 1 Gürtelclip
- 1 Netzadapterstecker
- 1 Telefonanschlusskabel
- 2 wiederaufladbare Batterien AAA
1,2 V 800 mAh NiMH

Zum Lieferumgang eines PowerTel 502 gehören:


- 1 Basisstation
- 1 Ladeschale
- 2 Schnurlostelefone
- 2 Batteriefachdeckel
- 2 Gürtelclips
- 2 Netzadapterstecker
- 1 Telefonanschlusskabel
- 4 wiederaufladbare Batterien AAA
1,2 V 800 mAh NiMH

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzadapterstecker, das Telefonanschlusskabel und die Batterien, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 500 oder 502 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten

1 Basisstation anschließen


- i. Stecken Sie ein Ende des Netzadaptersteckers in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in die Netzsteckdose.
- ii. Stecken Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels in die mit  gekennzeichnete Buchse der Basisstation, das andere Ende aber noch nicht in die Netzsteckdose.

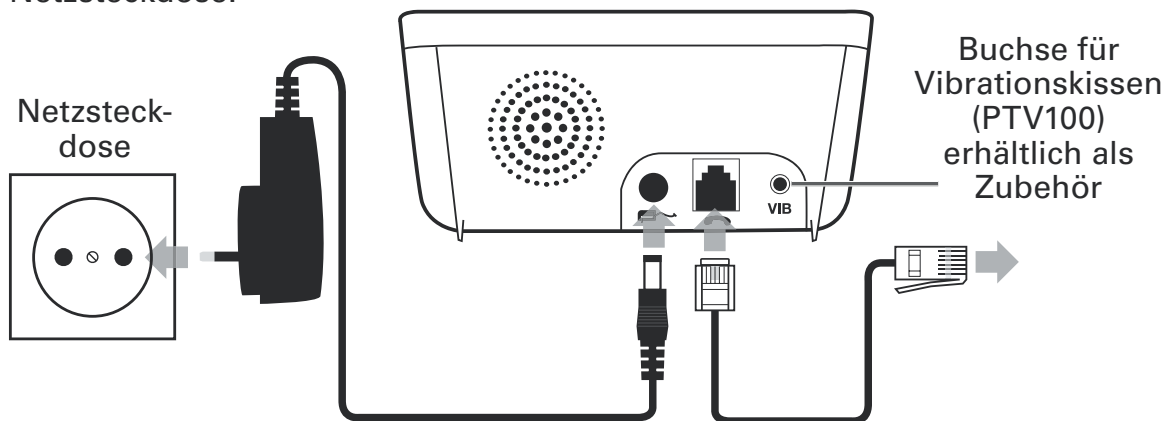

Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzadapterstecker, das Telefonanschlusskabel und die Batterien, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 500 oder 502 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

2 Batterien einsetzen

- i. Setzen Sie die beiden wiederaufladbaren Batterien in das Akkufach des Mobilteils ein. Achten Sie auf die richtige Polung ("+" und "-").
- ii. Schließen Sie das Akkufach.

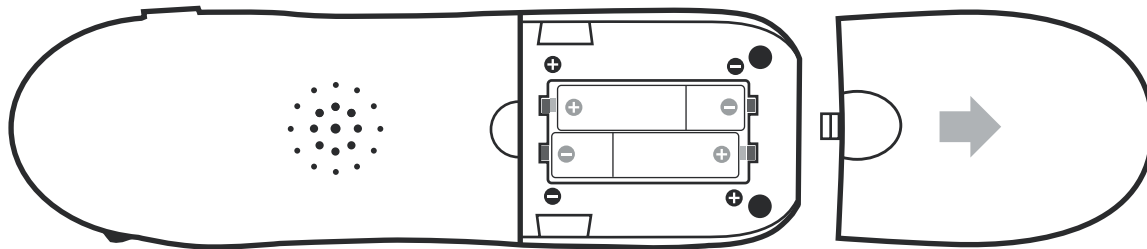

3 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 15 Stunden in die Ladeschale gesetzt werden (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten, wiederaufladbaren Batterien des Typs AAA (NiMH, 800 mAh). Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Batterietyp verwendet werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkaline-Batterien.


4 Telefonanschlussschnur einstecken

Wenn die Batterien vollständig geladen sind, können Sie das noch freie Ende des Telefonanschlusskabels in die Netzsteckdose stecken.

Nur für Benutzer des PowerTel 502

1 Ladeschale anschließen

Stecken Sie den bereits mit der Ladeschale verbundenen Netzadapterstecker in die Netzsteckdose.

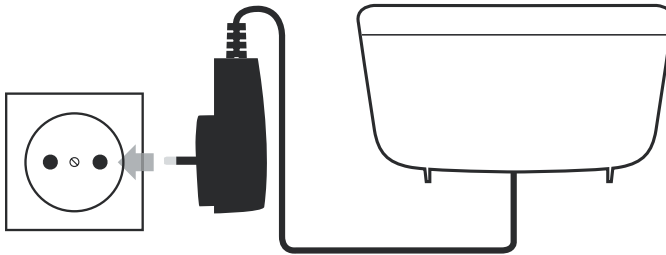

2 Batterien einsetzen

Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 10.

3 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 15 Stunden in die Ladeschale gesetzt werden (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).

Gürtelclip befestigen (optional)

Im Lieferumfang enthalten ist ein Gürtelclip, den Sie bei Bedarf an der Rückseite des Mobilteils befestigen können. Drehen Sie das Mobilteil einfach um und schieben Sie den Gürtelclip vorsichtig in die beiden seitlichen Löcher.

Damit ist Ihr PowerTel 500 bzw. 502 einsatzbereit!

Nebenstellenanlagen: Wenn Sie das Telefon in einer privaten Nebenstellenanlage einsetzen wollen (und beispielsweise für die Belegung einer Amtsleitung eine "0" vorwählen müssen), gehen Sie vor wie auf Seite 52 beschrieben.

Symbole im Display des Mobilteils

Die im Display des Mobilteils angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Menü



Bestätigung / OK



Telefonbuch-Modus



Weitere Zeichen links aufrufen



Weitere Zeichen rechts aufrufen



Batteriezustand



Rufton aus



Tastatursperre aktiv



Freisprech-Modus



Anruf



Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)



Mobilteil-Mikrofon stumm schalten



Sie haben neue Anrufe



Leuchtet, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet

Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der
Basisstation befindet



Interner Anruf

Navigation im Menü

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die Funktionen **beider** Telefone über die Menüs aufrufen können.

Verwendung der Menüs

Wenn Sie Ihre Telefone eingerichtet und alle Bestandteile angeschlossen haben, können Sie sämtliche Funktionen Ihres Telefons über die Menüs im Display erreichen – beispielsweise Anrufe tätigen und entgegennehmen oder auch Benutzerprofile einrichten und Telefonnummern speichern.

Grundlegende Funktionen

Hauptmenü öffnen: Drücken Sie .

Untermenü ansteuern: Öffnen Sie das Hauptmenü und drücken Sie  bzw. .

Untermenü auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gesuchte Position unterlegt ist, und bestätigen Sie dann mit .

Funktion ansteuern: Öffnen Sie ein Untermenü und drücken Sie wiederholt  bzw. .

Funktion auswählen: Drücken Sie wiederholt   bzw.  / R, bis die gewünschte Funktion unterlegt ist, und bestätigen Sie dann mit .

Ziffern oder Buchstaben eingeben: Über die Telefontastatur.

Eingaben oder Aktion bestätigen oder speichern: Drücken Sie .

Abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren: Drücken Sie .

Hinweis: Wenn 20 Sekunden lang keine Eingaben mehr erkannt werden, geht das Telefon automatisch in den Standby-Modus.

Telefonieren

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Telefonieren

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur des Mobilteils ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch durch Drücken von .

Anruf beenden

Drücken Sie .

Anruf annehmen

Nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation und sprechen Sie in das Telefon. Wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation liegt, drücken Sie die Taste  und sprechen in das Telefon.

Wahlwiederholung

Am Mobilteil werden die zehn zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste .
2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit der Taste  bzw.  auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie , so dass die Nummer gewählt wird.

Verpasste Anrufer zurückrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 30 eingegangenen Anrufe.

1. Öffnen Sie die Anrufliste mit der Taste .
2. Gehen Sie mit  /P bzw. /R auf die Nummer, die Sie zurückrufen wollen, und drücken Sie .

Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Wie Sie Telefonnummern in Ihrem Telefonbuch speichern, ist auf Seite 43 erläutert.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste .
2. Gehen Sie mit der Taste  /P bzw. /R auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie .

Telefonnummer per Kurzwahltaste wählen

Wie Sie Telefonnummern unter den Kurzwahltasten speichern, ist auf Seite 46 erläutert.

1. Rufen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer durch Drücken der Taste  oder  auf.
2. Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.

Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil

Die Lautstärke dieses Telefons ist lauter als bei einem normalen Telefon, kann aber selbstverständlich reguliert, also lauter oder leiser gestellt werden.

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke regulieren, indem Sie den Schalter an der Seite nach oben oder unten schieben.

Hörerlautstärke verstärken

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Taste  oben links an der Seite des Mobilteils verstärken. Im Display blinkt ein Ohrsymbol, solange die Verstärkerfunktion eingeschaltet ist.

Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung, wenn Sie mit einem Anrufer sprechen wollen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen, oder wenn andere Personen im Raum das Gespräch mithören sollen.

Freisprech-Modus

1. Zum Einschalten des Freisprech-Modus drücken Sie zweimal die Taste .
2. Zum Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie .
3. Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus verschieben Sie den Schalter an der rechten Seite des Mobilteils oder drücken die Taste  bzw. .

Hinweis: Im Freisprech-Modus steht die Verstärkerfunktion ( ) nicht zur Verfügung.

Sprechzeitanzeige

Die Dauer eines Telefongesprächs wird im Display angezeigt.

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der rechten Seite des Mobilteils. An diese Buchse kann auch eine Induktionsschleife für Hörgeräte NL100 angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon stummschalten, so dass der Anrufer Sie nicht mehr hören kann.

Stummschalten des Mikrofons am Mobilteil

Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie einfach . Im Display wird Mute Ein angezeigt. Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie nochmals . Im Display wird Aus angezeigt.

Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil

Zum Aus- und Einschalten des Ruftons drücken Sie  und halten diese Taste einige Sekunden lang gedrückt.

Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren

Auch wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe annehmen. Zum Sperren der Tastatur drücken Sie  und halten diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Im Display wird das Symbol  angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie unmittelbar nacheinander die Tasten  und .

Hinweis: Die Funktionen „Interner Anruf“, „Externen Anruf intern weiterleiten“ und „Konferenzgespräche führen“ stehen nur zur Verfügung, wenn Sie Benutzer eines PowerTel 502 sind oder ein (oder mehrere) zusätzliche(s) Mobilteil(e) in Ihrem Telefonsystem angemeldet haben.

Interne Anrufe

Wenn Sie zwei oder mehr Mobilteile bei Ihrer Basisstation angemeldet haben, können Sie intern zwischen den Mobilteilen telefonieren. Jedem Mobilteil wird bei der Anmeldung eine spezielle Nummer, beispielsweise HS1, HS2 etc., zugewiesen. Diese Gespräche sind kostenlos.

1. Halten Sie die Taste  **INT**. Im Display wird **Mobilteil?** angezeigt. Geben Sie die interne Rufnummer des gewünschten Telefons ein, z. B. **2** (für das **Mobilteil 2**).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie Taste  drücken.

Externen Anruf intern weiterleiten

1. Halten Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  INT gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **2** (für **Mobilteil 2**).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .

Hinweis: Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, können Sie ihn durch Drücken der Taste  INT wieder zurücknehmen.

Konferenzgespräche führen

1. Halten Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  INT gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. **2** (für Mobilteil 2).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie die Taste  kurz drücken und wieder loslassen.
4. Um den externen Anruf auf Halten zu setzen, drücken Sie  INT.
5. Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie die Taste  drücken.

Mobilteil anmelden

Sie brauchen ein Mobilteil nur dann anzumelden, wenn es von der Basis abgemeldet wurde oder wenn Sie ein neues Mobilteil gekauft haben.

Wichtig: Neue Mobilteile müssen vollständig aufgeladen worden sein, bevor sie angemeldet werden können.

Am Mobilteil:

1. Halten Sie die Taste  ca. 10 Sekunden gedrückt, bis im Display **Paging Taste drücken** angezeigt wird.

An der Basisstation:

2. Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis im Display **anmelden** angezeigt wird.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil muss abgemeldet werden, wenn Sie zu viele Mobilteile bei Ihrem Telefonsystem angemeldet haben oder wenn ein fehlerhaftes Mobilteil ausgetauscht werden muss.

Mobilteil abmelden am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil anmelden** und drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Mobilteil abmelden** und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN-Code (Standard-PIN 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. **1**) und bestätigen Sie mit .

Mobilteil suchen

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen oder dem Benutzer eines Mobilteils signalisieren, dass Sie ihn sprechen möchten, indem Sie von der Basisstation aus ein akustisches Signal auslösen.

1. Drücken Sie an der Basisstation die Taste . An dem (den) Mobilteilen ertönt ein Piepton.
2. Drücken Sie an der Basisstation nochmals die Taste  bzw. auf dem Mobiltelefon eine beliebige Taste, um den Piepton auszuschalten.

Stromausfall – was ist zu tun

Bei einem Stromausfall kann von diesem Telefon aus nicht mehr angerufen werden. Deshalb müssen für Notrufe spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Umgang mit dem Menü

Umgang mit dem Menü

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf Seite 42.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.

Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Benutzerprofile

Sie können zwei verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke" (Lautst.), "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 10 Buchstaben) personalisieren.

Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Name** und drücken Sie .

4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. zehn Buchstaben) ein und drücken Sie .

Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Lautst.** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 4).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**Ein** oder **Aus**).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klangreglereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Setzen Sie das Mobilteil durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil kopieren

Sie können ohne weiteres ein Profil auf ein anderes angemeldetes und kompatibles PowerTel-Telefon kopieren.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kopiere** und drücken Sie .

4. Gehen Sie mit **<INT** bzw. **R** auf das Mobilteil (z. B. **2**, **3** oder **4**), auf das Sie das Profil kopieren wollen, und drücken Sie .
5. Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Profil kopiert haben: Drücken Sie , um den Kopiervorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abzubrechen.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, brauchen Sie ein Telefon – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie vor der Annahme  oder  – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, halten Sie vor der Wahl der Telefonnummer  oder  gedrückt – je nachdem, welches Profil Sie aktivieren möchten. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Klingelton ändern

Insgesamt zehn verschiedene Klingeltöne stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. **Rufton** ist unterlegt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Extern** bzw. **Intern** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **7 [Extern]**, **9 [Intern]**).
5. Gehen Sie mit  bzw.  auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .

Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus **Aus** stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Klang regulieren

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie den Klang während eines Telefongesprächs regulieren wollen, rufen Sie mit  die Klangregler-Funktion auf. Dann können Sie die Einstellung mit  bzw.  entsprechend dem Balkendiagramm im Display des Mobilteils ändern. Sie verlassen den Klangregler-Modus, indem Sie den Lautstärkeregler seitlich am Telefon drücken.

Verstärkung dauerhaft aktivieren

Wenn Sie diese Funktion auf **Ein** setzen und dann die Taste   (oben links seitlich am Mobilteil) drücken, wird die letzte Verstärkereinstellung im Telefon gespeichert und für jeden Anruf verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Immer laut** und drücken Sie .

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Aus**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Name des Mobilteils ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil Name** und drücken Sie .
3. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
4. Geben Sie einen neuen Namen ein (max. 12 Buchstaben) und drücken Sie .

Tastenton ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Tastenton** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**Ein** oder **Aus**).
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton mit  bzw.  und drücken Sie .

Kontrast ändern

Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl, damit Sie das Display so einstellen können, wie es für Sie am besten lesbar ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kontrast** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 3).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Direktannahme aktivieren oder deaktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt das Mobilteil eingehende Anrufe automatisch an, sobald Sie das Telefon aus der Ladeschale nehmen. Dies ist die Standardeinstellung.

Wenn die Direktannahme deaktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Direkt-Annahme** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern

Je nach Einstellung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 40 Sekunden aus.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Beleucht.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **10 Sek.**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Bestätigungston ein-/ausschalten

Diesen Ton hören Sie, wenn Sie eine Einstellung ändern. Sie können dieses akustische Signal ein- oder ausschalten.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bestätig. Ton** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ein**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Basis wählen

Diese Funktion brauchen Sie, wenn Ihr Mobilteil bei mehr als einer Basisstation angemeldet ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis wählen** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Autom.** oder **Manuell**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Sprache ändern

Für Ihr Mobilteil stehen insgesamt sechs verschiedene Sprachen zur Auswahl: **Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch** und **Niederländisch**.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Deutsch**).
4. Ändern Sie die Sprache mit  bzw.  und drücken Sie .

Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Datum/Uhr** und drücken Sie .
3. Geben Sie den Tag, den Monat, das Jahr und die Stunden ein (Ihr Telefon verwendet das 24-Stunden-Format) und drücken Sie .

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Format** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **24 Std.**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  auf **12 Std.** bzw. **24 Std.** und drücken Sie .

Alarm einstellen

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm einstellen** (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie .
3. Stellen Sie die Weckzeit ein, entweder **Einmal**, **Täglich**, **Montag - Freitag** oder **Aus** und drücken Sie .
4. Stellen Sie die Weckmelodie ein und drücken Sie .

Nachtlicht ein-/ausschalten

Hinweis: Die Nachtlicht-Funktion steht erst zur Verfügung, wenn ein Alarm eingestellt worden ist. Siehe oben.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Nachtlicht** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ein**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Einstellung der Basisstation

Klingelton der Basisstation ändern

Insgesamt stehen zehn verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. **Rufton** ist unterlegt. Drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **8**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Ruftonlautstärke der Basisstation ändern

Insgesamt stehen fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus **Aus** zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 53.

Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 52.

System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **System PIN** und drücken Sie .
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie .
4. Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code zweimal einzugeben. Drücken Sie dann .

Umgang mit dem Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie ganz einfach, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden.

Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben

Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:

-  drücken für eine Leerstelle
-  drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
-  drücken für die Umschaltung von Großbuchstaben (z. B. ABC) auf Kleinbuchstaben (z. B. abc)

Hinweis: Wenn Sie ein und denselben Buchstaben zweimal eingeben wollen, drücken Sie die betreffende Buchstabentaste einmal, warten dann, bis der Cursor hinter den eingegebenen Buchstaben rückt, und drücken die Taste erneut.

Telefonbucheinträge speichern

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Drücken Sie . Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie .

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Einträge bearbeiten**. und drücken Sie .
4. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .

5. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag. Wenn Sie alle Einträge löschen wollen, unterlegen Sie einen beliebigen Eintrag.
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abubrechen.

Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 24.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Eintrag Kopieren)

- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Eintrag hinzu)
- Alle Einträge (Alle Kopieren)

Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie mit "Eintrag hinzu" kopieren.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen oder mehrere zu kopierende Einträge und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag Kopieren**, **Eintrag hinzu** oder **Alle Kopieren** und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  **INT** bzw. **R** das Telefon aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. **2** für **Mobilteil 2**) und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste .

Umgang mit dem Kurzwahlspeicher

Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter folgenden Kurzwahltasten ablegen: ^M① und ^M②.

Kurzwahleintrag speichern

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ^M① oder ^M②, unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie . Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie . Im Display erscheint **Gespeich.**

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Tasten ^M① oder ^M②, um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie . Im Display erscheint **Einträge bearbeit.** Drücken Sie nochmals .

3. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .
4. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend . Im Display erscheint **Gespeich.**

Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Tasten  oder , um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Eintrag löschen?** angezeigt. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abzubrechen.

Umgang mit der Anrufliste

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Hierfür ist unter Umständen vierteljährlich eine Gebühr zu bezahlen.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von  können Sie Ihre Anrufliste öffnen. Mit  bzw.  können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen. Weitere Informationen wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit des Anrufs können Sie mit  anzeigen.

Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie .
3. Im Display wird **Speich. Telefonb.** angezeigt. Drücken Sie .
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und die Telefonnummer aus und drücken Sie .

Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Löschen** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abzubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  auf **Alle löschen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Alle löschen?** Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, oder , um ihn abubrechen.

Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage



Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Wenn Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist (und Sie für die Belegung einer Amtsleitung beispielsweise eine 0 vorwählen müssen), steht Ihnen die **R**-Taste für die Weiterleitung von Anrufen und den automatischen Rückruf zur Verfügung. Schauen Sie in dem zu Ihrer Nebenstellenanlage gehörigen Handbuch nach, welche Flash-Zeit eingestellt werden muss, damit diese Funktionen in der Nebenstellenanlage benutzt werden können. Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Auswahl: 100 ms (**Kurz**) und 300 ms (**Lang**).

Flash-Zeit einstellen am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie dann mit  **P** bzw.  **/R** auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  **P** bzw.  **/R** auf **Flash** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).
4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit  **P** bzw.  **/R** aus und drücken Sie .

Wählpause einfügen

Wenn Sie für die Belegung einer Amtsleitung eine bestimmte Ziffer wählen müssen und es eine Weile dauert, bis Sie das Freizeichen hören, können Sie eine Pause einfügen und dann anschließend wählen, ohne ein Freizeichen abzuwarten.

Zur Einfügung einer Wählpause geben Sie die übliche Nummer für die Belegung

der Amtsleitung ein und halten dann zwei Sekunden lang  gedrückt. Ein **P** im Display signalisiert, dass die Wählpause aktiviert ist.

Hinweis: Eine Wählpause kann auch in eine Telefonnummer im Telefonbuch eingefügt werden.

Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen

Ihr Telefon unterstützt auch zusätzliche Leistungsmerkmale wie beispielsweise Warten und Konferenzgespräche. Umfassende Informationen, ob und wie Sie diese Leistungsmerkmale nutzen können, erhalten Sie bei dem Betreiber Ihres Fernsprechnetzes.

Wählmodus einstellen

Zwei Wählmodi stehen zur Verfügung: Tonwahl und Impulswahl. Standardmäßig ist die für Europa vorgegebene **TONWAHL** eingestellt.

Wählmodus ändern

- Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
- Gehen Sie mit  bzw.  auf **Wählverfahren** und drücken Sie .
- Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ton**).
- Wählen Sie den gewünschten Wählmodus (**Tonwahl** bzw. **Impulswahl**) mit  bzw.  aus und drücken Sie .



Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholungsliste nicht gelöscht.

Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Halten Sie **R** > 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie , um das Rücksetzen auf die Standardeinstellungen zu bestätigen, oder , um es abubrechen.

Falls Probleme auftauchen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation den Netzadapterstecker ziehen und die Batterien aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Batterien wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Fehlersuche

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen

1. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Ladeschale ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Setzen Sie es mindestens 15 Stunden lang in die Ladeschale (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).
2. Tauschen Sie die wiederaufladbaren Batterien aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Batterietyp.

Das Telefonsystem reagiert nicht

Wahrscheinlich müssen Sie wieder die Standardeinstellungen aktivieren. Siehe hierzu Seite 54.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil bzw. die Basisstation klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 21, 32 und 40.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verwendungszweck des Telefons

Dieses Telefon ist für das Telefonieren in einem öffentlichen Fernsprechnetzt bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. **Auf keinen Fall** sollten Sie das Gerät öffnen und selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Nicht durch Möbelstücke verdeckt
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur den mit dem PowerTel 500 bzw. 502 gelieferten Netzadapterstecker.

Ein Stromausfall kann sich sowohl auf Ihr Telefon als auch auf andere Geräte auswirken. Da bei einem Stromausfall von diesem Telefon aus nicht mehr angerufen werden kann, müssen für Notrufe spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Energiesparender Netzadapterstecker

Der zum Lieferumfang gehörige Netzadapterstecker erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Adaptern älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Wiederaufladbare Batterie (Akkus)

Werfen Sie diese Batterien auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Aufgrund des breiten Spektrums angebotener Hörhilfen können wir allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

Wichtig: Wenn die "Verstärkung" eingeschaltet ist, kann der Lautstärkepegel dieses Telefons außerordentlich hoch sein. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn dieses Telefon auch von Personen mit normalem Gehör benutzt wird.

Entsorgung

Sie sind verpflichtet, bei der Entsorgung von Verbrauchsgütern die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Das Symbol  auf diesem Produkt bedeutet generell, dass elektrische und elektronische Geräte **getrennt** vom Hausmüll an einer geeigneten Sammelstelle des zuständigen Entsorgungsträgers abgegeben werden müssen. Batterien können beim batterievertreibenden Handel sowie bei den zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

Verpackungsmaterial muss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Technische Daten

Standard	DECT ¹ GAP ²
Stromversorgung (Basisstation)	Eingang: 230 VAC 50 Hz Ausgang: 12 VDC 670 mA
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m Innen: ca. 50 m
Standby	Bis zu 100 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 Std.
Wiederaufladbare Batterien	AAA 1,2 V 800 mAh NiMH
Wählmodus	Tonwahl (DTMF) Impulswahl
Optimale Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %
Flash-Zeit	100, 300 ms

- ¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für schnurlose Telefone.
- ² GAP: Generic Access Profile = Standard für den Betrieb von Mobilteilen und Basisstation unterschiedlicher Hersteller.

Standardeinstellungen

Wie Sie das Gerät wieder auf die werkseitig vorgegebenen Einstellungen zurücksetzen, ist auf Seite 54 erläutert.

Standardeinstellungen Mobilteil

Sprache	Deutsch
Name des Mobilteils	PowerTel
Ruftonmelodie (extern)	7
Ruftonmelodie (intern)	9
Ruftonlautstärke des Mobilteils	5
Ruftonmelodie der Basisstation	8
Ruftonlautstärke der Basisstation	5
Tastenton	Ein
Direktannahme	Ein
Kontrast	3
Beleuchtungszeit	10 Sek.
Verstärkereinstellung	Aus
Flash-Zeit	100 ms
Wählmodus	Ton
PIN-Code	0000

Wartung und Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.



Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **www.amplicom.eu** herunterladen.

Stichwort- verzeichnis

A

Abmelden des Mobilteils 24-25
Alarm 39
Ändern des PIN-Codes 41
Anmelden eines Mobilteils 24
Annehmen eines Anrufs 18
Anruf annehmen 18
Anruf beenden 18
Anrufen 18
Anrufliste 48-50
Anschließen von Basisstation und Ladeschale 9-10
Anzeige der Sprechzeit 21
Anzeigesprache ändern 37
Aufladen der Batterien 10

B

Basis wählen 37
Basisstation einstellen 40
Batterien aufladen 10
Batterien einsetzen 10
Beenden eines Anrufs 18
Beleuchtung 36
Benutzerprofile 28-31
Bestätigungston 36

D

Datum/Uhrzeit 38
Direktannahme 35

E

Einsetzen der Batterien 10
Einstellen der Flash-Zeit 52
Einstellen des Freisprech-Modus 20

F

Fehlersuche 56-58
Flash 52
Freisprecheinrichtung 20

G

Garantie 65
Groß- bzw. Kleinbuchstaben aktivieren 42

H

Headset-Verwendung 21
Hintergrundbeleuchtung 36
Hörerlautstärke 20
Hilfe 55-58

I

Interne Anrufe 22

K

Klang regulieren 33
 Klangregler 33
 Klingelton 32, 40
 Klingelton Basisstation 40
 Klingelton Mobilteil 32
 Konferenzgespräche führen 23
 Konformitätserklärung 66
 Kontrast ändern 35
 Kurzwahl 19, 46-47

L

Ladeschale anschließen 9-10
 Lautstärke 20, 32, 40

M

Menü-Navigation 15-16
 Mobilteil abmelden 24-25
 Mobilteil anmelden 24
 Mobilteil-Name 34
 Mobilteil suchen 25

N

Nachtlicht 39
 Name des Mobilteils ändern 34
 Navigation im Menü 15-16

Nebenstellenanlage 51

P

Pause einfügen 52
 PIN-Code 41
 Profile 28-31

R

Regulieren der Lautstärke 20
 Rufton ein/aus 21
 Ruftonlautstärke Basisstation 40
 Ruftonlautstärke Mobilteil 32

S

Sicherheitsinformationen 60
 Speichern eines Kurzwahl-
 eintrags 46
 Speichern von Telefonbuch-
 einträgen 43
 Sperren der Tastatur 22
 Sprache 37
 Sprechzeitanzeige 21
 Standardeinstellungen 64
 Stromausfall 25
 Stummschalten des Mikrofons 21
 Suchen eines Mobilteils 25
 Symbole im Display 13-14

T

Tastatursperre 22

Tastenton ein/aus 34

Technische Daten 63

Telefonbuch 19, 42-45

Telefonbucheinträge 42,45

U

Uhrzeit 38

V

Verpackungsinhalt prüfen 8

Verpasste Anrufer zurückrufen 19

Verstärken der Hörerlautstärke 20

Verstärkereinstellung 33

Verwendung der Menüs 15-16

Verwendung des Headsets 21

W

Wählen aus dem Telefonbuch 19

Wählen der Basis 37

Wählen per Kurzwahltaste 19

Wählmodus 53

Wählpause 52

Wahlwiederholung 18

Wartung 65

Weiterleiten externer Anrufe 23

Wiederherstellen der
Standardeinstellungen 54

Z

Zurücksetzen auf Standard-
einstellungen 54



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

DEC 09 – ISSUE 1.

